

ERGO TRAINER by WIN CARE



DESCUBRE LA
REHABILITACIÓN
CON ALIVIO
DE PESO.

EXPERIENCIA EN PRODUCTOS

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS



BENEFICIOS PARA EL TERAPEUTA:


- Supervisa varios tratamientos a la vez.
- Su uso es muy intuitivo.
- Accede al paciente desde cualquier ángulo.



PARA LA REHABILITACIÓN DE:

- Marcha.
- Fuerza.
- Movilidad.
- Equilibrio.
- Sistema cardiovascular.
- Actividades de la vida diaria.

GRACIAS AL BRAZO
DINÁMICO CON RANGO
DE 55 cm.

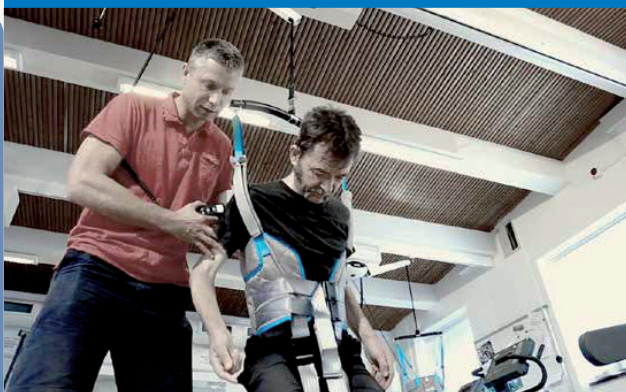

WIN  CARE

EXPERIENCIA EN PRODUCTOS

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS



BENEFICIOS PARA EL PACIENTE :

- Conocerá el límite de sus capacidades.
- Mejorará en autoestima y motivación.
- Aprovechará el 100% del tiempo de terapia.
- Se sentirá en un ambiente totalmente seguro.
- Inicio temprano de la rehabilitación.



PARA PACIENTES CON :

- Daño cerebral adquirido.
- Parálisis cerebral.
- Enfermedad neurológica.
- Lesión medular.
- Geriatría.
- Adulto.
- Infantil.
- Bariátrico.

GRACIAS AL ALIVIO DE PESO DE HASTA 85 KG



WIN  CARE

EXPERIENCIA EN PRODUCTOS

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS



El **Ergo Trainer** es un sistema con soporte de alivio de peso que proporciona una solución eficaz para rehabilitación y fisioterapia. Ha sido diseñado para pacientes que sufren una amplia gama de trastornos neurológicos y músculo esqueléticos como: **daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, enfermedad neurológica, lesión medular, lesiones de columna, posturales, de equilibrio, de movilidad y deportivas**. Puede ser usado en pacientes geriátricos, adultos, infantiles y bariátricos. Utilizado con frecuencia junto con una cinta para andar con soportes al suelo o rieles de techo, el Ergo Trainer permite la realización de un ejercicio intensivo combinado con un entrenamiento de fuerza y soporte de peso corporal que da como resultado una recuperación más rápida en estos pacientes.

Para este artículo hemos realizado una **ENTREVISTA** con Emilio Álvarez, Fisioterapeuta y Codirector de FORZA NEURO REHABILITACIÓN para hablar sobre Ergo Trainer:

WinnCare: Emilio, ¿En qué fecha instalaste el Ergo Trainer?

Emilio Álvarez: El primer sistema Ergo Trainer instalado en España ha sido en nuestro centro, FORZA NEURO REHABILITACIÓN, a mediados del mes de Noviembre de 2020, en Cantabria.

WinnCare: ¿Qué opinión tienes del producto?

E.A.: El sistema de descarga de peso dinámico Ergo Trainer, es un dispositivo muy versátil, ya que permite un amplio abanico de posibilidades, desde favorecer el desplazamiento de personas que cursan con todo tipo de patologías del aparato locomotor hasta convertirse en una pieza clave en procesos de rehabilitación, posibilitando infinidad de ejercicios y actividades funcionales.

Las publicaciones científicas de los últimos años afirman que es necesario un alto número de repeticiones, actividades desafiantes y un ambiente enriquecido para permitir el aprendizaje y potenciar la capacidad plástica del sistema nervioso, por ello es esencial contar con un equipamiento que ofrezca dicha variabilidad como Ergo Trainer.

WinnCare: ¿Qué necesidades estás cubriendo y/o qué problemas le estás solucionando a tus usuarios/clientes en FORZA NEURO REHABILITACIÓN con el Ergo Trainer? ¿En qué tipo de pacientes/patologías lo estas usando o planificas usarlo?

E.A.: El sistema permite descargar/aliviar el peso corporal, lo que incrementa la movilidad en personas con déficit de fuerza, control motor y equilibrio, aspectos muy mermados en las personas que acuden a nuestro centro por algún tipo de patología neurológica. Gracias a la utilización de Ergo Trainer fusionado con otros sistemas de entrenamiento como el tapiz rodante, la elíptica o el remo

conseguimos mejorar la resistencia cardiorrespiratoria de nuestros usuarios. El sistema también nos permite evitar la sobrecarga física del equipo terapéutico a la hora de facilitar, en personas con mayor afectación, posturas y actividades más exigentes como la bipedestación e incluso favorecer la marcha (llegando a necesitar en muchas ocasiones sin el sistema a 2-3 personas para dicho fin), mientras que en otros usuarios con mayor capacidades motóricas, posibilita la práctica de tareas que de otra manera serían imposibles como volverse a subir a una tabla de surf o de skateboard, con lo que cubrimos además otro punto clave en el proceso rehabilitador que es la motivación. Otro aspecto fundamental que conseguimos con Ergo Trainer es otorgar a la rehabilitación de la máxima seguridad posible, evitando cualquier tipo de caída durante el desarrollo de las terapias, todo ello hace que nuestros usuarios aumenten su confianza y se atreven a desafiar al máximo sus límites.

WinnCare: ¿Has tenido algún caso de éxito de superación con el producto en FORZA NEURO REHABILITACIÓN que nos puedas contar?

“Gracias a la utilización de Ergo Trainer fusionado con otros sistemas de entrenamiento como el tapiz rodante, la elíptica o el remo conseguimos mejorar la resistencia cardiorrespiratoria de nuestros usuarios.”

E.A.: Hemos tenido muchos, pero por mencionar alguno en particular podríamos citar el caso de un hombre de 70 años, diagnosticado de Parkinson desde hace más de 10 años. Este hombre acudió a nuestro centro con los objetivos de mejorar su autonomía en actividades funcionales como el vestido y desvestido de la parte inferior del cuerpo y poder retomar la práctica de una actividad deportiva como el senderismo. Tras la realización de un protocolo de terapia intensivo donde el sistema Ergo Trainer permitió mejorar de manera muy significativa su velocidad de marcha en tapiz rodante e incrementó la fuerza en miembros inferiores (consiguiendo realizar saltos de 30-40 cm de altura) lo que permitió alcanzar todos los objetivos y la consecución de una actividad física rutinaria, rompiendo con el sedentarismo en el que se encontraba en la última etapa de su enfermedad. Se puede profundizar en mayor medida en dicho caso ya que está documentado en nuestra página web, donde se reflejan todos los cambios obtenidos (cambios objetivables) acompañados de un video del trabajo realizado.

<http://www.forzaneurorehabilitacion.com/blog/protocolo-intensivo-en-parkinson/>

Protocolo Intensivo en Parkinson

WinnCare: Muchas gracias, Emilio por tan interesante y productiva entrevista. Estamos muy complacidos por los éxitos que a FORZA NEURO REHABILITACIÓN pueda ofrecer el Ergo Trainer y muy emocionados porque vemos en el Ergo Trainer una solución para la rehabilitación con innumerables beneficios tanto para los pacientes como para los cuidadores.

ERGO TRAINER

Descubre la rehabilitación con alivio de peso.

El Ergo Trainer está diseñado para pacientes que sufren una amplia gama de trastornos neurológicos y músculo esqueléticos como: **daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, enfermedad neurológica, lesión medular, geriatría, adulto, infantil, bariátrico, lesiones de columna, posturales, de equilibrio, de movilidad, deportivas, etc.**

El entrenamiento de soporte de peso corporal utilizado en combinación con el entrenamiento en cinta y otros ejercicios fisioterapéuticos, permitirá un inicio más temprano, una mayor intensidad y más repeticiones en un nivel funcional más alto que la fisioterapia convencional.

Ergo Trainer elimina los riesgos de lesiones por caídas para el paciente y el levantamiento de objetos pesados para el terapeuta. Con el Ergo Trainer, el paciente está sujeto de forma segura con un arnés para caminar.

En este entorno seguro para las caídas, el terapeuta puede "presionar" al paciente para que haga más, el paciente puede "presionarse" a sí mismo para hacer más, logrando así una recuperación más rápida y resultados más rápidos que con los "métodos de rehabilitación convencionales.

A medida que el estado del paciente progresa y se alcanzan los objetivos fijados, tanto la distancia de caída como la cantidad de peso corporal pueden reajustarse para estimular al paciente a aumentar su actividad durante el entrenamiento.


El brazo móvil y dinámico permite una amplia gama de ejercicios de terapia adicionales.

El rango de flotación vertical del brazo dinámico es de **55 cm** medido desde el área de la ingle del paciente hasta el suelo. Se ajusta con el control manual.

La distancia de caída del paciente se ajusta individualmente en el control manual a la distancia que se le permite al paciente ser atrapado en el arnés antes de caer y detenido por el brazo dinámico.

La ausencia de barreras restrictivas proporciona al terapeuta la posibilidad de ayudar al paciente en su proceso terapéutico de manera sencilla, pudiendo guiar y corregir manualmente los miembros inferiores durante la marcha.

El paciente tiene un movimiento de rotación de 360° sin restricciones de sus brazos y piernas.

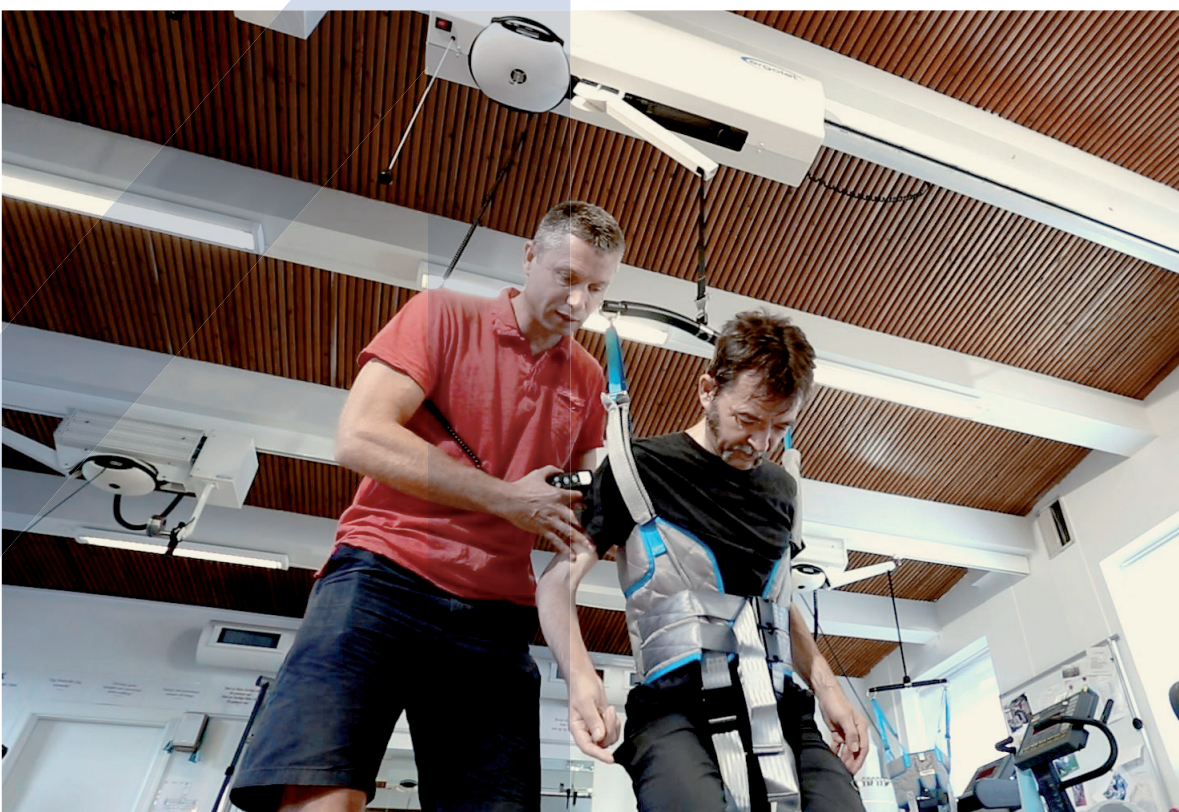

EXPERIENCIA EN PRODUCTOS


SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIOS

ERGO TRAINER

by

WIN CARE

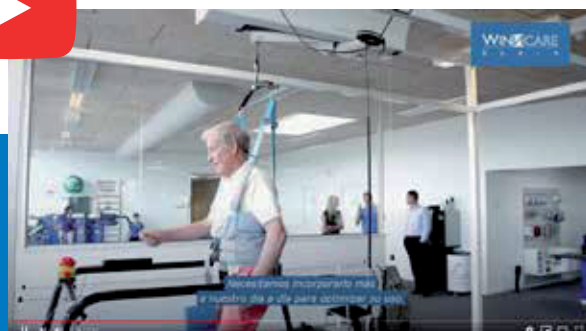

Para más información, visita
nuestro canal de Youtube
WINNCARE SPAIN TV

info@winncare.es
www.winncare.es

