

CLINIQUE **axlar automorpho[®]**

METHODE

- Etude observationnelle, contrôlée, prospective, multicentrique avec analyse descriptive
- Etude réalisée de **2005 à 2006** par le Réseau Ville Hôpital du Languedoc Roussillon en soins à domicile (80%) et en EHPAD (20%)
- **38 patients** inclus : âge moyen 80 ans ; sex-ratio F/H 2,7 ; IMC moyen initial 20.8 (11,7 ; 30,8)
- Patients quotidiennement alités en moyenne 20 h avec 4 repositionnements, levés au moins 1 fois
- Risque d'escarres élevé : Norton moyen initial : 8 (5 ; 12) ; **74 escarres** initiales : 40% sacrées, 27% talonnières ; 23% stade 1-2 et 67% de stade 3-4
- Typologie des pathologies principales : associées au vieillissement, dermatologie, neurologie, cancérologie, ortho-traumatologie
- 6 suivis effectués à J0, J1, J3, J10, J20 et J31

RESULTATS

■ CRITERE PRINCIPAL : Tolérance et qualité de vie

- ✓ Compatibilité avec une prise en charge à Domicile

Efficacité	94%	Niveaux de satisfaction
Compatibilité avec actes de soins	90%	
Sécurité	88%	
Interface utilisateur	85%	
Facilité d'installation	84%	
Ergonomie	84%	

- ✓ Qualité de vie maintenue ou améliorée

Confort moyen : **8,6/10** ; Bien-être moyen : **8,1/10**

■ CRITERE SECONDAIRE : Evolution de l'état cutané des patients

- ✓ Aide à la prévention et au traitement des escarres de stade 1 à 4

