

Gripo støttestang

- længst muligt i eget hjem

HEPRO 



Et system – mange muligheder

GRIPO en god støtte i hverdagen

GRIPO er et solidt og fleksibelt hjælpemiddel, som giver tryghed for brugeren, når denne vil rejse sig op eller foretage en forflytning i eget hjem. Gripo passer til alle rum og er meget nem at montere. Gripo støttestang fungerer udemærket alene, men kan også suppleres med forskelligt gavnligt tilbehør.

- Støtte, når du trænger til det
- Udnytter brugerens egne ressourcer
- Nem at montere, demontere og flytte
- Monteres uden skruer, søm eller brug af værktøj
- Stort udvalg af brugbart og fleksibelt tilbehør
- Utallige anvendelseområder



Gripo
Varenummer 055-00010





Bøjle, triangel

Mosgummi og universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 058-30010



- Monteret i rigtig højde kan Triangel bøjlen også bruges som hovedstøtte



To-håndsgreb

Med mosgummi og universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 058-30012




- Gør det lettere at rejse sig op fra seng/stol
- Gør det lettere at foretage forflytning til/fra kørestol
- Ved brug af 2-3 stk. monteret i forskellige højder, kan de anvendes til at træne stand-funktion ved hjælp af «klatre» effekt



Vertikalt minigreb

Rørdiameter 22 mm med 2 universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 058-30013

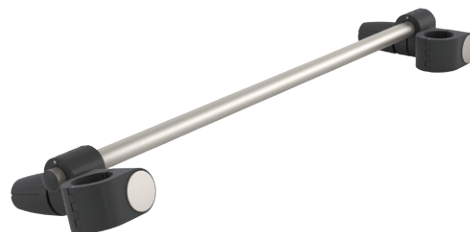



Gallegreb

Med 2 universalbeslag 40/22 mm.

Håndtag i strop med mosgummi

Varenummer 058-30011



Fordelen ved Gallegreb/Gripo

- Giver brugeren støtte, når denne trænger til det
- Giver en følelse af at kunne præstere
- Aflaster plejen/hjælperen samt mindsker risikoen for belastningsskader
- Aktiverer brugeren, hvilket er vigtigt for blodcirkulationen og mave/tarmfunktionen
- Støtte ved forflytning og stillingsændring i seng
- Omkostningsbesparende i og med at brugeren og de pårørende selv kan klare mere uden assistance fra plejepersonale



Gallegreb rør som sidestøtte

Uden strop og krog. Med 2 universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 058-30047



- Ingen løse dele
- Støtte til at rejse sig op og forflytning på f.eks. toiletet

Gelænder rør

Diameter 40 mm. 75 cm lang.
Universalbeslag bestilles separat
[Varenummer 058-30032](#)

Diameter 22 mm. 75 cm lang.
Univesalbeslag bestilles separat
[Varenummer 058-30031](#)



Monteres mellem 2 Gripo stænger i lav position

- Giver støtte og hjælp til bruger ved af- og påklædningsituationer
- Giver bruger med funktionsnedsættelse muligheden for selv at klare af- og påklædningsituationer

Gelænder rør dia. 22 mm

75 cm lang. Med mosgummi.
Universalbeslag bestilles separat
[Varenummer 058-30033](#)



- Kan monteres skråt f.eks. som gelænder ved en mindre trappe eller ved niveau forskel
- Monteres på badeværelset ved vask eller ved toiletet mellem 2 Gripo støttestænger

Gelænder rør diameter 40 mm

160 cm lang. Universalbeslag bestilles separat
[Varenummer 058-30034](#)



Monteres som gangbare mellem 2 Gripo stænger

- Til rum med højt dørtrin, hvor bruger ikke kan komme ind med f.eks. kørestol
- Gangbare f.eks. mellem seng og toilet, i gangen eller lignende hjælp til at brugeren kan klare sig selv
- Kan monteres efter hinanden, som en lang gangbarre ved hjælp af flere Gripo stænger





Kombinationsgreb

Med 2 universalbeslag 40/22 mm

Varenummer 058-30025



- Godt to-håndsgreb for brugere med store hænder
- Meget stabilt (vrider ikke)
- Kan bruges som greb i 2 højder («klatre» greb)
- Bruger kan læne sig op af grebet ved af- og påklædningsituationer



Sæde opklappeligt

Med universalbeslag 40/40 mm

Bredde 36 cm, dybde 40 cm

Varenummer 058-30021



(Maks brugervægt 110 kg)



Armlæn, sidestøtter

Bredde mellem armlæn 56 cm

Varenummer 058-30026



Tablet holder

Til tablet eller smartphone.
Med universalbeslag 40/22 mm
Varenummer 058-30097




Rektangulært bord

41 x 31 cm. Med universalbeslag 40/22 mm.
Kan også anvendes som PC-bord
Varenummer 058-30020



Træningselastikker med håndtag

Med universalbeslag 40/22 mm
Varenummer 058-30027

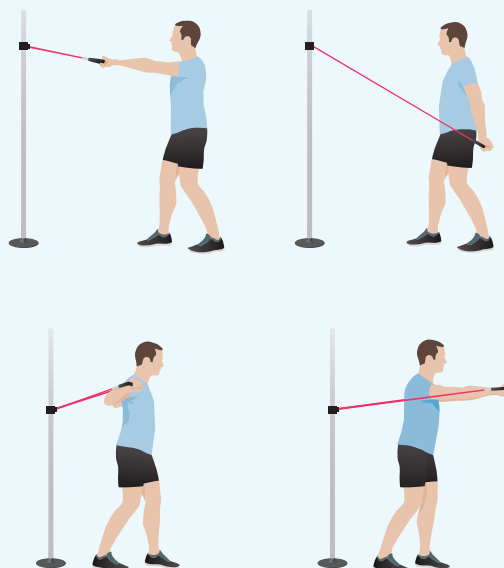

Varenummer oversigt

Gripo

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
055-00010	Gripo Komplet	For lofthøjde 210 - 300 cm
055-00013	Gripo Speciel	For lofthøjde lavere enn 210 cm
055-00011	Gripo Lang	For lofthøjde 260 cm - 320 cm
055-00012	Gripo Ekstra. Har 15 cm ekstra højde for montering af tilbehør	For lofthøjde 225-300 cm

Universalbeslag med fri rotation

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30028	Uden tandhjuls formet spændeskive	Diameter 40/22 mm
058-30042	Uden tandhjuls formet spændeskive	Diameter 40/40 mm
058-30088	Uden tandhjuls formet spændeskive	Diameter 22/22 mm

Universalbeslag med gradvis rotation

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30037	Med tandhjuls formet spændeskive	Diameter 40/22 mm
058-30040	Med tandhjuls formet spændeskive	Diameter 40/40 mm

Universalbeslag med modtager For let at kunne hæve og sænke gelænder røret.

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30038	Endestop for gelænder rør	Diameter 40/22 mm
058-30041	Endestop for gelænder rør	Diameter 40/40 mm

Galgegreb

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30011	Komplet med 2 universalbeslag 40/22 mm Håndtag i strop med mosgummi	Maks brugervægt 110 kg
058-30030	Med håndtag i strop uden universalbeslag	Maks brugervægt 110 kg

Galgegreb rør for sidestøtte

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30101	Med glide stoppere Uden universalbeslag	Maks brugervægt 110 kg
058-30047	Med glide stoppere og 2 universalbeslag 40/22 mm	Maks brugervægt 110 kg

Bøjle, triangel

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30010	Med mosgummi Med universalbeslag 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm
058-30080	Med mosgummi Uden universalbeslag	Rørdiameter 22 mm

Kombinationsgreb

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30025	Komplet med 2 universalbeslag 40/22 mm	Højde 24 cm, længde 30 cm Rørdiameter 22 mm



Varenummer oversigt

To-håndsgrep

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30012	Med mosgummi, med universalbeslag 40/22 mm	Greb bredde 48 cm Rørdiameter 22 mm
058-30044	Med mosegummi. Uden universalbeslag	Bredde, gripeflade 48 cm Rørdiameter 22 mm



Mini-greb, vertikalt

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30013	Med 2 universalbeslag 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm



Gelænder rør

Varenummer	Beskrivelse	Spesifikasjoner
058-30031	Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 22 mm
058-30033	Med mosgummi. Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 22 mm
058-30032	Uden universalbeslag	75 cm langt, rørdiameter 40 mm
058-30034	Uden universalbeslag	160 cm langt, rørdiameter 40 mm



Vægbeslag

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30035	Endestop for gelænderør mod væg	For rørdiameter 22 mm
058-30036	Endestop for gelænderør mod væg	For rørdiameter 40 mm



Sæde opklappeligt

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30021	Med universalbeslag 40/40 mm	Bredde 35 cm, Dybde 40 cm Maks. brugervægt 110 kg
058-30045	Uden universalbeslag	Maks. brugervægt 110 kg



Armlæn/sidestøtter til opklappeligt sæde

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30026	Med universalbeslag 40/40 mm	Bredde mellem armlæn 56 cm.



Top plade til skrå loft

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30022	For montering i skrå loft	Regulerbar



Top plade til svagt loft

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30018	Top plate stor	70 x 31 cm



Toiletrulleholder


Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30049	Med universalbeslag 22/22 mm	
058-30023	Med universalbeslag 40/22 mm	



Gripo anvendes til øvelser med træningselastik


Siddende roning med elastik

Fastgør elastikken i brysthøjde og sid med ansigtet vendt mod fastgørelsespunktet. Tag fat i elastikken med begge hænder og træk elastikken ind mod brystet, samtidig med at du trækker skulderbladene sammen. Før elastikken langsomt tilbage og gentag øvelsen.

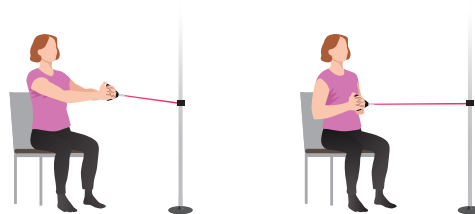


Siddende træning af ben

Fastgør elastikken over ankelhøjde og sid med ansigtet vendt mod fastgørelsespunktet. Der skal være god støtte i lænden, tag fat i stolens armlæn for støtte. Med elastikken fastgjort omkring hælen føres benet bagover og ind under stolen. Før elastikken langsomt tilbage til udgangspunktet og gentag øvelsen.

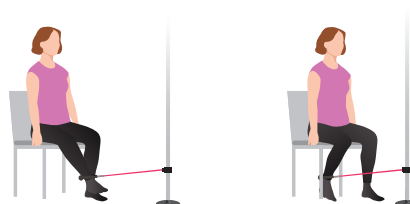


Øvelse med balance på 1 ben med elastik

Stå på et ben med hænderne i siden. Fastgør en elastik rundt om ankelen på det ben, du ikke står på. Bevæg det strakte benet skiftevis frem og tilbage i forhold til benet du står på.

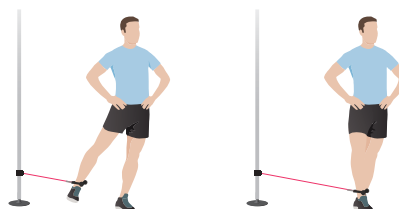


Stående benløft bagud med elastik

Fastgør elastikken nederst på Gripo stangen og rundt om ankelen. Stå med ansigtet mod Gripo stangen. Høfteleddet er let bøjet på det aktive ben. Før benet bagover og stræk maksimalt i hoften. Byt ben.

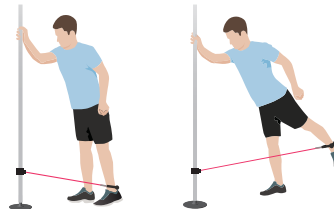


”Stenkast” med elastik

Fastgør elastikken højt oppe på Gripo stangen. Stå med et håndtag i hver hånd og med ansigtet mod stangen. Hold armene strakte ud fra kroppen og træk armene bagover. Slip langsomt bagefter.

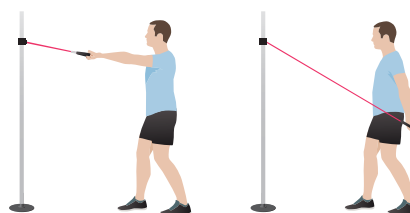

Stående brystpres med elastik

Fastgør elastikken i ca. brysthøjde. Stå med ryggen mod Gripo stangen og hold armene ud til siden ca. i brystniveau. Albuerne skal være bøje og pres armene frem, samtidig med at armene strækkes ud.

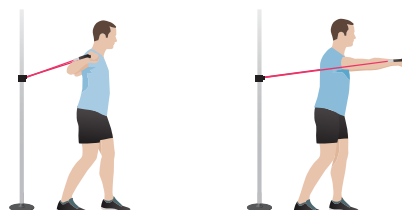


Varenummer oversigt

Bord

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30020	Med universalbeslag 20/20 mm	Bordplade, 41 x 31 cm
058-30039	Uden universlbeslag	Bordplade, 41 x 31 cm



Tablet holder

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30097	Med foring og universalbeslag 40/22 mm 	For nettobredde fra 7" til 12" Længde 45 cm



Monitor arm til Gripo

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30098	Med universalbeslag 40/40 mm 	Til TV / Dataskærm. Længde 60 cm, Maks. 15 kg



LED-lys lampe

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30099	Med universalkobling 40/22 mm	Længde 48 cm. Lampediameter 30 mm



Gribe strømpe

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30100	For bedre greb. Fastgøres med lynlås	Længde 20 cm. For rørdiameter 40 mm



Træningselastik med håndtag

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30027	For brug til øvelser med træningselastik	Med universalbeslag 40/22 mm



Elastik træningsbånd

Varenummer	Beskrivelse	Specifikationer
058-30102	For brug rundt om håndled og ankler	Med universalbeslag 40/22 mm



Tekniske specifikationer

Gripo	
Krav til lofthøjde	Min. 210 cm - Maks. 300 cm
Krav til loftkonstruktion	Skal tåle punktbelastning på 100 kg
Maks. belastning	100 kg horisontalt midt på stangen
Brugervægt	Maks. 150 kg
Materiale	Aluminium og plast
Produktets egenvægt	4,7 kg, uden tilbehør

Præstere • Tryghed • Trivsel

Om producenten

HEPRO AS er en moderne og fremtidssikret kompetencevirksomhed, som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler af høj kvalitet i godt design. Vore lokaler ligger på Rognan inderst i Saltenfjorden omringet af fjelde og en fantastisk natur.

Virksomheden blev etableret i 1987 og har en lang erfaring med udvikling af produkter og løsninger, som skal gøre hverdagen nemmere for vores kunder.

I tæt samarbejde med ergoterapeuter udvikler vi produkter og løsninger, som er skræddersyet til vores kunders behov og som kan hjælpe i forhold til mobilitet, balance, komfort og hygiejne. Målet er at give tryghed, præstation og øget aktivitet igennem funktionelle og brugerorienterede produkter. Vi engagerer os i den enkelte bruger og går langt for at levere produkter, som er tilpasset de individuelle behov.

WinnCare Nordic ApS, Ergolet by WinnCare Nordic har forhandlingen af Gripo støttestang i Danmark.



RING TIL OS PÅ

70 27 37 20

✉ SALG@ERGOLET.DK



by WinnCare Nordic

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgevej 12 C, 4220 Korsør