

# QUICKGUIDE

## Luna IPx4 loftlift



### VIGTIGT

- Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved og loftlift og strop under løft.
- Håndbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.

### BATTERI

- 100%
- 50 %.
- **SKAL SÆTTES TIL LADNING!**

### OPLADNING

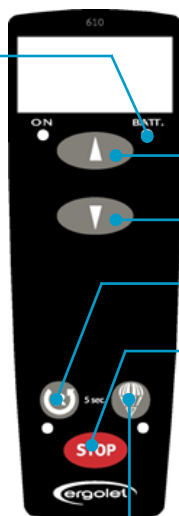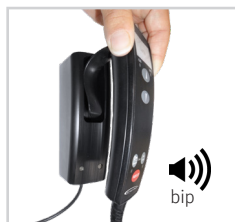

Lift op

Lift ned

Reset

Nødstop

### NØDNEDFIR

- 1) Aktiver elektrisk nødnedfir på håndbetjening.

*Hvis det elektroniske nødnedfir ikke virker, benyttes det mekaniske:*

- 2) Tag nøglen fra ladestation.
- 3) Fjern stik til håndbetjening fra Luna.
- 4) Fjern prop i siden af Luna
- 5) Stik nøglen i hullet på siden af Luna.
- 6) Drej nøglen ind til krog med åg er i ønsket position.

Strop monteret (flytbar)

Bajonet monteret (fast monteret)

### SEJL


1) Sejlstroppen føres ind over krog i åben position.

2) Stropperne trækkes ned således at krogerne lukker.

3) Afmontering gøres modsat. Stropperne trækkes op, krogerne åbner, sejlet løftes af.



Ladestation, nøgle til mekanisk nødnedfir.

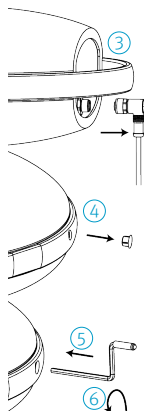

Scan QR-koden for yderligere informationer




SWL 275kg

## NEDTAGNING AF LIFT MED STANG




1. Sænk liften ned i holderen på Luna bordet
2. Hold stroppen stram
3. Pres stangen ind nederst på låsen (se skitse A)
4. Pres stangen op ad mod låsen (se skitse B)
5. Løft låsen af krogen (se skitse C)
6. Når stroppen køres ind på plads, skal den altid holdes stramt. Lad evt. låsen sidde på stangen, så den er klar til næste værelse.



## SVING GENNEM DØR MED 1 LUNA

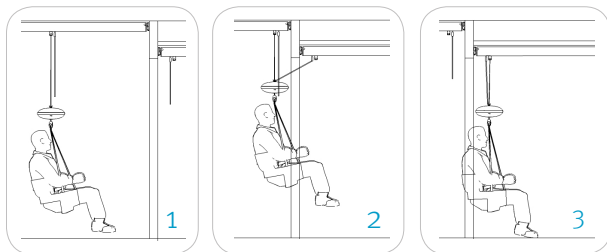

1. Luna og kørevogn i tilstødende rum placeres så tæt på døråbning som muligt.
2. Overførselsstroppen fra tilstødende rum kobles til det ledige bøjlebeslag på Luna. Stroppen slækkes langsomt ind til overførselsstroppen bærer brugerens vægt.
3. Den løse strop kan nu afmonteres og bør hænges op således at den ikke kommer i vejen for den videre forflytning.

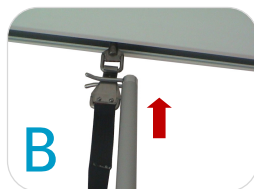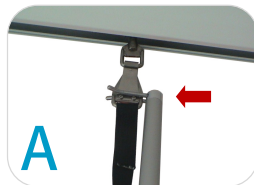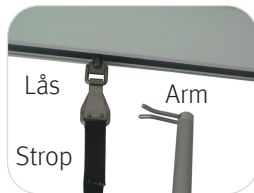

### VIGTIGT:

Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved og loftliften, inkl. strop under løft.

Sæt altid liften til opladning efter brug.

Håndbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.



Alle tæthedsklasse test er udført af TÜV.

WinnCare Nordic ApS  
Tårnborgevej 12C  
4220 Korsør  
tel. +45 70 27 37 20  
e-mail: info@winncare.dk

[www.winncare.dk](http://www.winncare.dk)

WINNOCARE  
N o r d i c