

LUNA® TWIN

275 til 400 kg - en fleksibel løsning

Luna Twin er en kombi-løfter, som består af to single løftemoduler, som hver har en løftekapacitet på 275 kg. Når løftemodulerne sammenkobles til én løfteenhed, har de en løftekapacitet på 400 kg.

De to single løftemoduler opsættes i hver sin kørevogn, hvor der er påsat et afstandsstykke på kørevognene. Afstandsstykket er forsynet med to stik, som monteres i løfteenhederne.

Håndbetjeningen monteres i det ene løftemodul. Der trykkes herefter på håndbetjeningens STOP-knap og efterfølgende 5 sek. på Reset-knappen. Der anvendes kun én håndbetjening, når løftemodulerne er sammenkoblet til Luna Twin 400 kg.

Løftestropperne på Luna Twin 400 kg holdes på plads med en afstandsbojle, som er monteret mellem de to løftestropper. På afstandsbojlen monteres en 2-pkt. løftebojle, som nemt og hurtigt fastgøres med et Quick lock-beslag. Denne løftebojle fås i målene 360 mm, 480 mm eller 580 mm.

Det er på Luna Twin-modellen muligt at justere den ene løftestrop med 50 mm op/ned. Denne funktion kan bruges som ekstra justering under forflytning, hvis der skulle være behov for det.

2-pkt. løftebojlen til Luna Twin kan nemt og hurtigt ændres til en fleksibel 4-pkt. løftebojle, som automatisk indstiller sig i forhold til brugeren. Den fleksible 4-pkt. løftebojle har en friktionsbremsefunktion, som sikrer, at løftebojlen ikke roterer utilsigtet under forflytningen. Den fleksible 4-pkt. løftebojle er konstrueret, så den også kan bruges til et enkelt løftemodul til 275 kg. Den fleksible 4-pkt. løftebojle fås i målene 360 mm, 480 mm og 580 mm.

Det er en fordel, at der kun skal indkøbes/lagerføres én type løfter, uanset om behovet er 275 eller 400 kg.

Vigtigste standardfunktioner

- Løftekapacitet på 275 og 400 kg.
- Løftebojle til Luna har patenterede sejkroge, som er enkle at anvende og sikrer for brugeren
- Nødfir både elektrisk og manuelt
- Nødstop via håndbetjening
- Luna løftemodul IPx4 som tåler overbrusning
- Håndbetjening IP64
- Soft start og stop
- Batteristatus indikeres ved både lys og lyd
- Beskyttelse mod overbelastning



2 x Luna
Twin
275 kg



Luna
Twin
400 kg

Fra Single til Twin
Fra 275 til 400 kg på 5 minutter
 - uden brug af værktøj



Én Luna
Twin



1



2



3



Tilbehør

Version	HMI-nummer	Varenummer
Luna Twin 275 kg (1 motor)	127380	015-03040
Luna Twin 400 kg (2 motorer) incl. afstandsstand og afstandsøjle	127383	015-03042
Tilbehør *	Varenummer	
Håndbetjening IP64	015-03120	
Løfteøjle for Luna Twin incl. Quick lock beslag	015-02202	
Bøjle 36 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion	015-02036	
Bøjle 48 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion	015-02037	
Bøjle 58 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion	015-02038	
Afstandsøjle til motorer Luna Twin 400 kg	016-02202	
Afstandsøjle til løftebånd Luna Twin 400 kg.	015-02200	

*Se separat brochure for håndbetjening, vægtskala og sejl samt komplet oversigt over løfteøjler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Single	Twin
Max.løftekapacitet	275 kg	400 kg
Længde af strop	2200 mm	2200 mm
Løfteområde fra min. højde	2025 mm	2025 mm
Vægt	6,7 kg uden åg	2 x 6,7 kg uden åg
Mål	320 x 130 mm	720 x 130 mm
Batterier	36 V, bly/syre-batterier	36 V, bly/syre-batterier
Opladning	100- 240 V, 0,5 A	100- 240 V, 0,5 A
Chassis	Slagfast, formstøbt ABS	Slagfast, formstøbt ABS
Støj uden vægt	Lwa under løft/sænkning er 48dB(A)	Lwa under løft/sænkning er 48dB(A)
Støj ved max vægt	Lwa under løft/sænkning er 52dB(A)	Lwa under løft/sænkning er 52dB(A)
Ladetid	4,5 timer når batteriet er afladet	4,5 timer når batteriet er afladet
Løftehastighed	35 mm/sek. uanset vægt	35 mm/sek. uanset vægt
Antal løft pr. opladning:	80 løft på en opladning	80 løft på en opladning
Tæthedsklasse	IPX4	IPX4



Alle tæthedsklasse-tests er udført af TÜV.



Rum til rum løsning er også mulig med Luna Twin løsningen.
 Kør blot Luna Twin gennem den unikke dørgennemføring fra WinnCare Nordic.

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle målangivelser er vejledende.
 WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.
 Produktfotos indeholder muligvis tilbehør.

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 05.07.2024 - Ver.4

WinnCare Nordic ApS
 Tårnborgevej 12C
 4220 Korsør
 Danmark
 tlf. +45 70 27 37 20
 e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WIN CARE