



VÆRDIG
PLEJE



FORBEDRET
ARBEJDSMILJØ



EFFEKTIV &
TIDSBESPARENDE

TRITON DUAL 150

Bade- og toiletstol med elektrisk højdejustering og sædetilt

FORBEDRET ARBEJDSMILJØ OG MERE KOMFORT

- Et godt arbejdsmiljø, hvor overbelastning af plejerens ryg, lænd, skuldre og knæ undgås.
- For brugeren giver den indstillelige stropryg en god siddekomfort og yder en god støtte. Sædetiltet medvirker til en god og tryk placering i stolen. Begge dele er med til at give brugeren en komfortabel siddestilling.
- For plejeren sikrer højdejusteringen den optimale indstilling af stolen af hensyn til de forskellige plejesituationer.
- For brugeren giver højdejusteringen øget selvstændighed, da det er muligt at indstille stolen, så brugeren selv kan komme op til håndvask og spejl og derved tage del i sin egen personlige hygiejne.

FUNKTIONER OG EGENSKABER

- DUAL security-funktionen sikrer, at hvis sædet er tiltet forover og herefter hæves, så vil sædet automatisk tilte 5 grader bagover. Herved undgår man, at brugeren føler, at han eller hun er ved at falde ud af stolen.
- Transportfunktion: Hold håndbetjeningens transportknap nede, indtil stolen er indstillet i transportposition, der sikrer, at stolen har de optimale køreevner.
- TRITON DUAL 150 har to hukommelsesknapper, som frit kan indstilles og benyttes i forhold til såvel plejerens som brugerens behov, så stolen hurtigt og nemt kommer i den korrekte position, f.eks. i forbindelse med hårvask eller toiletbesøg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. brugervægt: 150 kg

Afstand mellem armlæn: 470 mm

Sædedybde: 430 mm

Sædebredde: 460 mm

Sædehøjde: 552-930 mm

Total bredde: 620 mm

Længde: 840 mm
(1000 mm med fodstøtter)

Total højde (uden nakkestøtte):
1119-1497 mm

Vægt: 38 kg

Tiltvinkel: +7° til -30° ±2°

Tæthedsklasse: IPx6W

Ladetid: Ca. 4 timer

Batteri-kapacitet:
80-100 løft på én ladning

Varenr. HMI-nr.

TRITON DUAL 150 044-00063 139493

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Elektrisk højdejustering (Soft Start/Stop).
- Elektrisk sædetilt (+7° / -30°) og indstillelig stropryg giver øget komfort og brugerstabilitet.
- LINAK® styreboks med indbygget nødstop og nødfir samt serviceindikator ved anbefalet årlig service.
- IPx6W klassificeret: Takket være LINAK® IPX6 Washable™ er TRITON DUAL 150 testet til at kunne klare op til 50 gange i vaskemaskine.
- Udviklet efter Easy-Clean princippet, dvs. uden kroge og små kanter. Stolen har lukkede skruer/sammeføjninger samt fuldsvejet stel, som hindrer der står vand i rørene. Løfteaktuator er afdækket, hvilket gør den nem at rengøre for evt. stænk eller urenheder.
- Behandlet med dobbeltcoating, hvilket betyder stor resistens overfor rust.
- DUAL security-funktionen sikrer, at stolen ikke kan løftes og tiltes fremad samtidig.
- Transportfunktion på håndbetjeningen, som indstiller stolen til god og sikker transport af brugeren.
- To hukommelsesknapper på håndbetjeningen til automatisk indstilling og positionering af stolen.
- Multi-indstillelig nakkestøtte med indbygget stang, som ikke beskadiger væggen bag ved toilettet.
- Stolen passer ind over alle standard toiletter.
- Maks. brugervægt 150 kg.



Scan QR for at se brugermanual og QuickGuide.
For yderligere specifikationer, kontakt salg@winnocare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer.
Winnocare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.
Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winnocare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winnocare.com
E-mail: info@winnocare.dk
Telefon: +45 70273720

WIN  CARE