




SCAN FOR
MORE INFO!

Quick Guide

HÅNDBETJENING

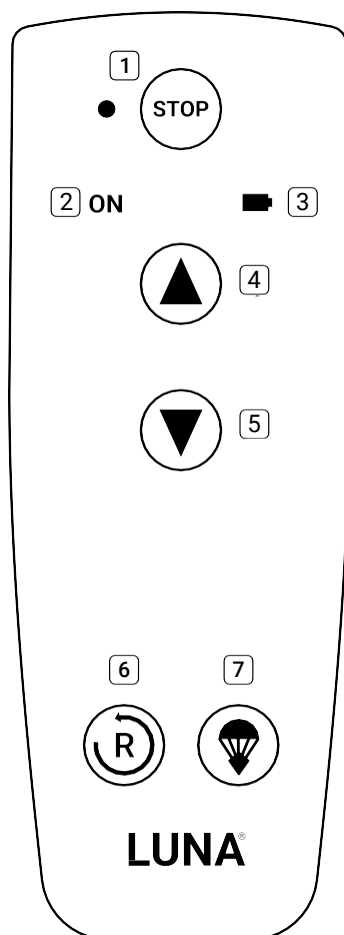

1 Nødstop

Tryk for at aktivere nødstop.

Lyser rødt, når nødstop er aktiveret.
Hold Reset-knap (6) nede for at deaktivere nødstop.

2 ON

Lyser grønt, når liften er i brug.

Alle lys slukker ca. 3 minutter efter brug.

3 BATTERI

- Grøn: 100%
- Orange: 50%
- Rød: Skal sættes til ladning

4 OP

5 NED

6 RESET

Hold nede i 5 sekunder for at deaktivere nødstop. Det røde lys slukker, og liften er klar til brug igen.

7 NØDFIR

Hvis OP/NED ikke virker.

Hold Knappen med nødfir nede under nedsækning, som starter efter 5 sekunder. Liften bipper konstant, når knappen holdes nede.


Vigtigt

Når LUNA[®] X5 ikke er brugt, skal den sættes til ladning:

- Placer håndbetjeningen i ladestationen.
- Forbind ladekabel til liften.

eller

Hvis skinnesystemet er udstyret med ITC (In-Track Charging), lades liften automatisk.

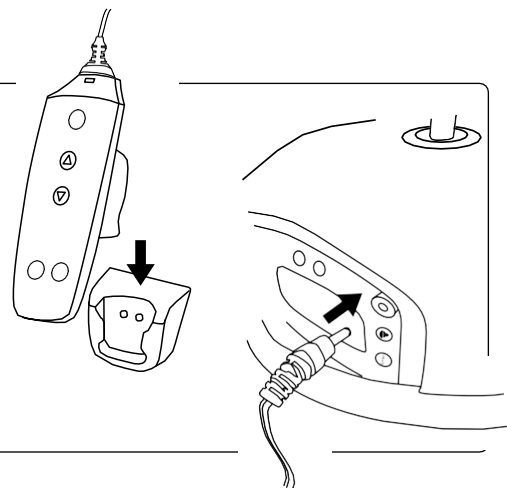

Manuelt nødfir

Hvis det elektriske nødfir ikke fungerer, kan man anvende det manuelle nødfir således:

- a Hiv nøglen til manuelt nødfir ud fra siden af løftemodulet
- b Indsæt nøglen i hullet ved siden af
- c Drej nøglen mod uret for manuel nødfir

